

MAXIMED
Latin America

BOWIE & DICK

LINHA VAPOR



BOWIE & DICK

LINHA VAPOR › PACOTE PRONTO

O Teste **BOWIE & DICK MAXXIMED** pacote pronto avalia com precisão o funcionamento das autoclaves a vapor assistidas por bomba de vácuo. Identifica falhas como remoção de ar inadequada, má penetração de vapor, vazamentos de ar, vapor de baixa qualidade, presença de gases não condensáveis, temperatura ou tempo de exposição incorretos.

De uso diário e obrigatório na rotina da CME, conforme determina a Resolução ANVISA RDC 15, artigo 93. É disponibilizado nas versões de 7 quilos e de 4 quilos e em conformidade com as normas da série ABNT NBR ISO 11140 para indicadores químicos.



BOWIE & DICK
**TESTE DE REMOÇÃO DE AR
TIPO PACOTE PRONTO - 4KG**



BOWIE & DICK
**TESTE DE REMOÇÃO DE AR
E PENETRAÇÃO DE VAPOR
TIPO PACOTE PRONTO - 7KG**

BOWIE & DICK

LINHA VAPOR › PACOTE PRONTO

COMPOSIÇÃO DO PACOTE:

O pacote teste **BOWIE & DICK MAXXIMED** é composto por um conjunto de folhas em papel poroso que, associado ao invólucro confeccionado em material impermeável, formam uma barreira de alto nível à remoção de ar e à penetração do vapor. Possui uma folha alerta antecipada que fornece uma avaliação prévia do ciclo e uma folha teste no centro que promove a leitura efetiva do ciclo. Ambas as folhas impregnadas com indicador químico de formulação atóxica, sem presença de chumbo e metais pesados.

O teste **BOWIE & DICK MAXXIMED** possui validade de 03 anos a partir da data de fabricação e é isento de registro junto a ANVISA, conforme Resolução RDC 185.




BOWIE & DICK

LINHA VAPOR › PACOTE PRONTO


GUIA DE LEITURA DE RESULTADO PARA BOWIE & DICK 4KG E 7KG

NÃO PROCESSADO

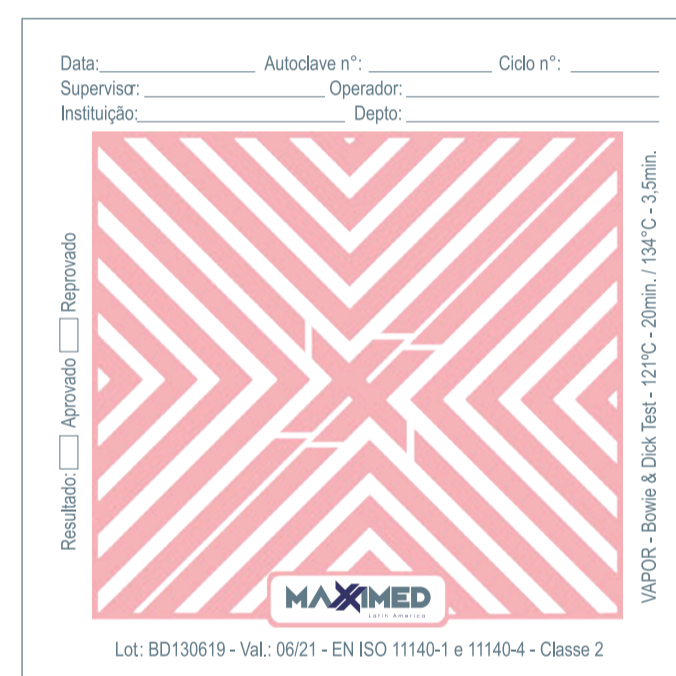

NÃO EXPOSTO. Cor original rosa mantida.

✓ APROVADO

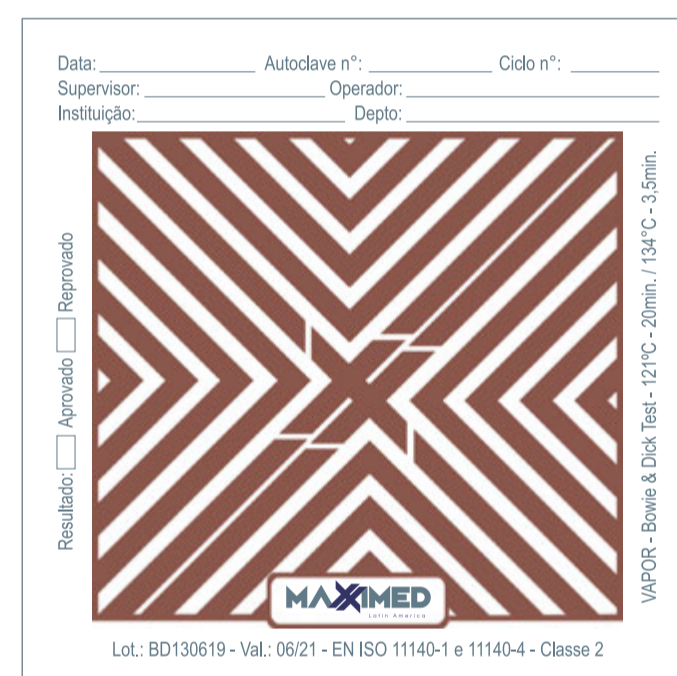


SEGURO. A cor marrom uniforme indica o funcionamento correto da autoclave.




SEGURO. A cor preta e uniforme indica o funcionamento correto da autoclave.


✗ REPROVADO

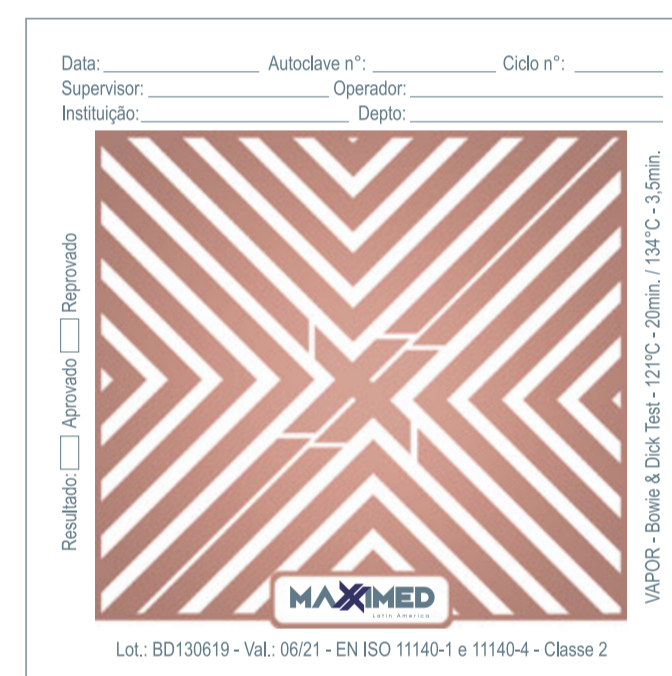


NÃO SEGURO. Temperatura e/ou tempo de exposição insuficientes.

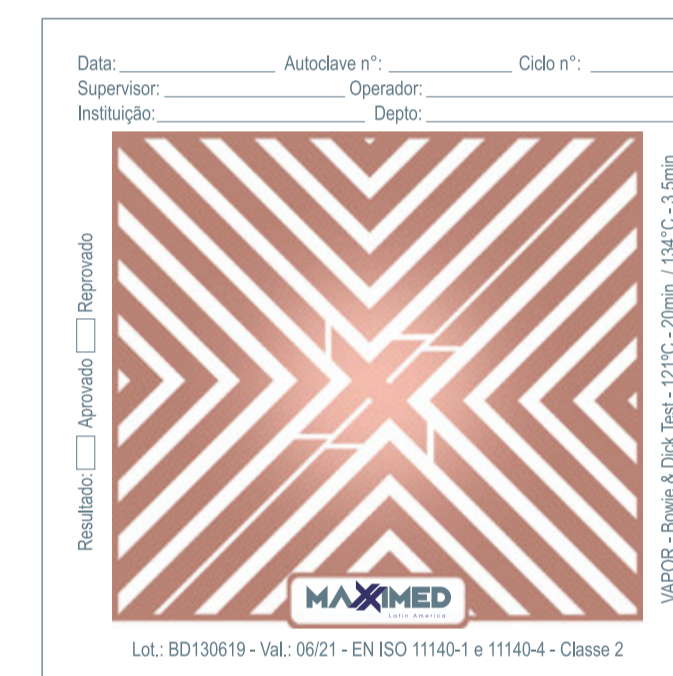

NÃO SEGURO. Remoção de ar inadequada.

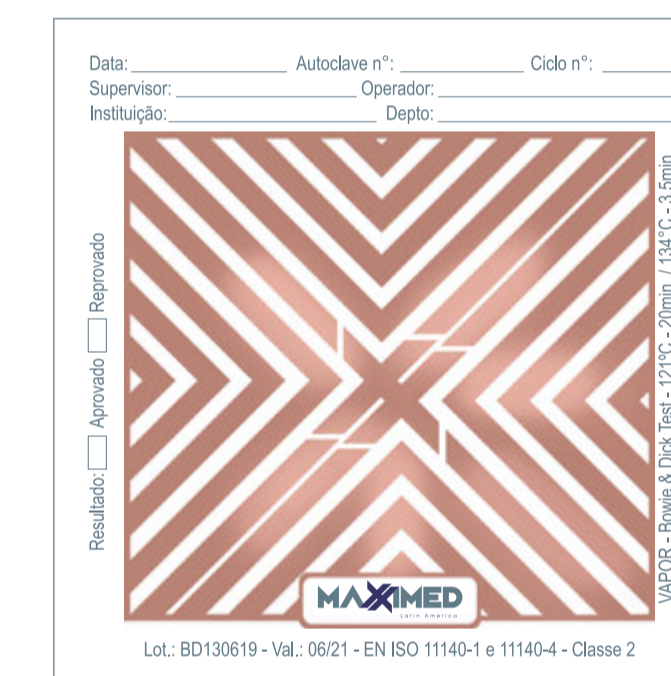

NÃO SEGURO. Presença de gases não condensáveis

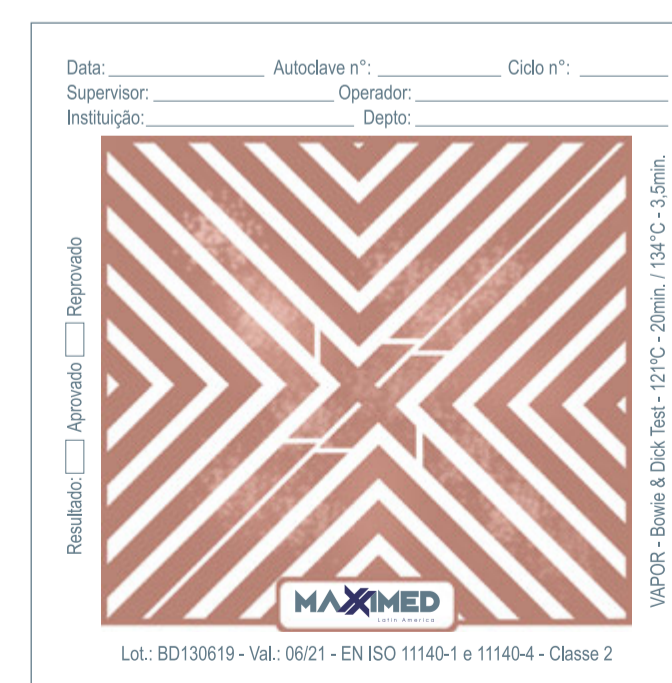

NÃO SEGURO. Vapor supersaturado.



NÃO SEGURO. Vapor superaquecido e/ou exposição excessiva.

BOWIE & DICK

LINHA VAPOR › PACOTE PRONTO

INSTRUÇÕES DE USO:



1. Separe e anote externamente em um pacote Teste Bowie & Dick MAXXIMED os dados de identificação: número da autoclave, número do ciclo e data.



2. Após o ciclo de pré-aquecimento e com a autoclave vazia, utilizando um suporte perfurado, posicione o pacote na área considerada mais inacessível (crítica) ao vapor saturado, geralmente situada próxima à porta e entre 10 cm e 20 cm acima do dreno.



3. Certifique-se que o pacote teste esteja na posição horizontal e com a face que contém o indicador químico Tipo 1 de cor rosa voltada para cima.



4. Acione o ciclo específico de Teste Bowie & Dick e ao final do ciclo retire o pacote teste do interior da autoclave e com as devidas precauções, pois estará quente.

[▶ ACESSE O VÍDEO](#)

BOWIE & DICK

LINHA VAPOR › PACOTE PRONTO

INSTRUÇÕES DE USO:



5. Verifique se o indicador químico externo Tipo 1 mudou da cor rosa para a cor marrom/ preta. Abra o pacote, retire e faça a leitura dos resultados da folha alerta e da folha teste (vide Guia de Interpretação).



6. Resultados:

Aprovado = funcionamento correto da autoclave e equipamento liberado para iniciar a rotina diária de esterilização.



Reprovado = falha no ciclo teste. Pegue um novo pacote teste e rode um novo ciclo seguindo todos os passos acima e, se o novo teste também resultar em reprovação, interdite o equipamento e acione a Engenharia Clínica/Manutenção para solucionar o problema técnico. **Consulte mais demonstrações de resultados reprovados no guia de resultados.**

 **ACESSE O VÍDEO**



7. Faça as devidas anotações na folha teste e registre os dados no livro ou controle de ciclos de esterilização da Instituição/CME. A folha alerta e a folha teste são documentos legais e devem ser arquivados em cumprimento às regulamentações vigentes.

MAXIMED

www.maxximed.com.br



TEMOS
ORGULHO
DE SER
BRASILEIROS



VISITE NOSSO SITE