



NÃO PROCESSADO

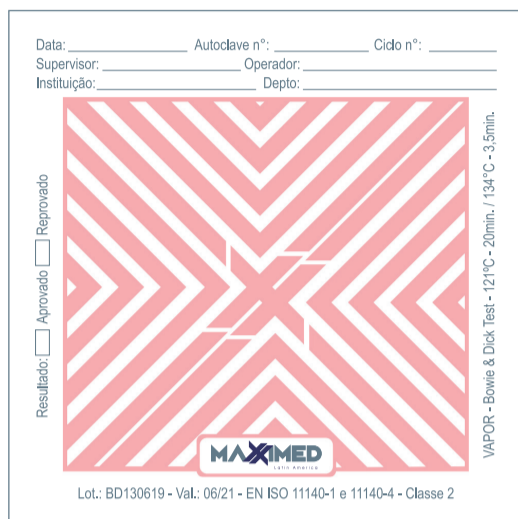

NÃO EXPOSTO. Cor original rosa mantida.

APROVADO

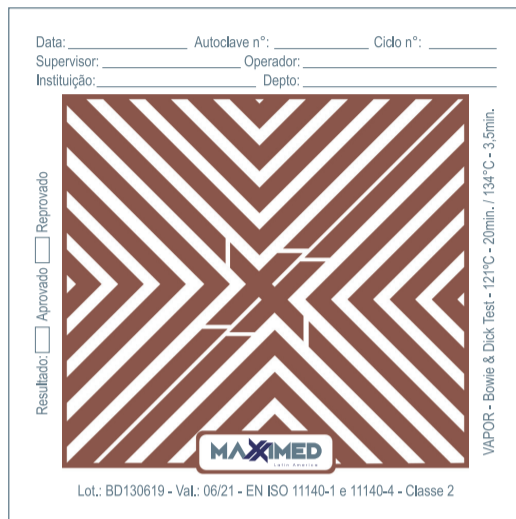


SEGURO. A cor marrom uniforme indica o funcionamento correto da autoclave.




SEGURO. A cor preta e uniforme indica o funcionamento correto da autoclave.


REPROVADO

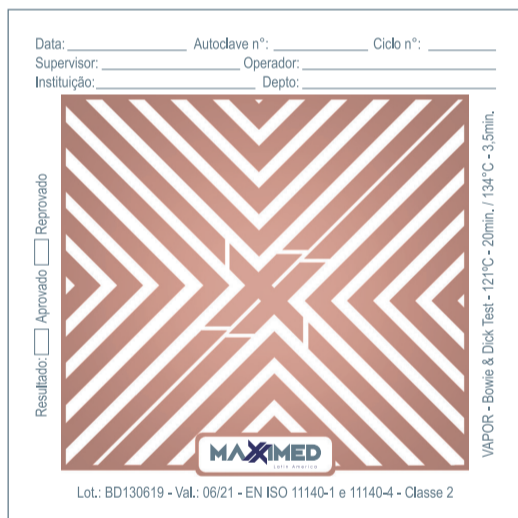


NÃO SEGURO. Temperatura e/ou tempo de exposição insuficientes.

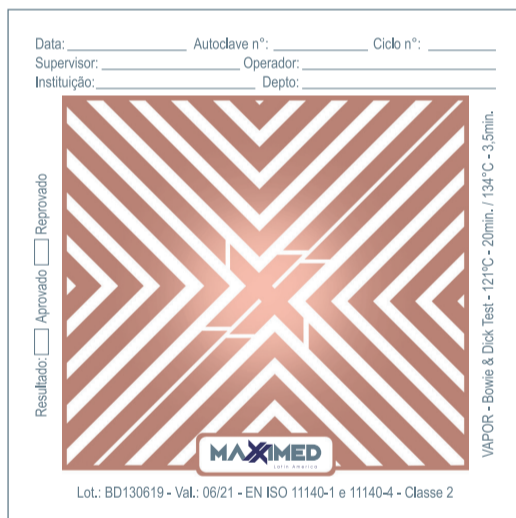


NÃO SEGURO. Remoção de ar inadequada.

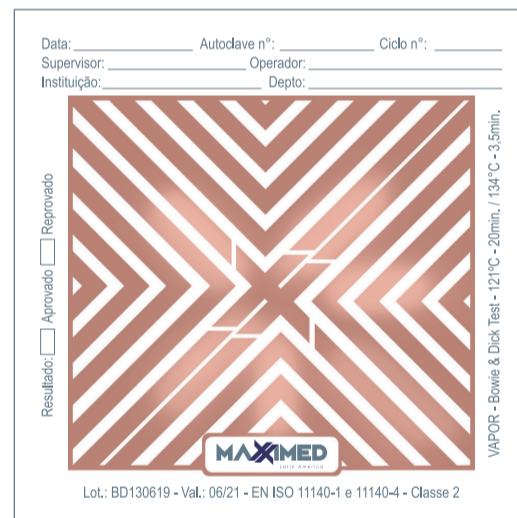

NÃO SEGURO. Presença de gases não condensáveis.

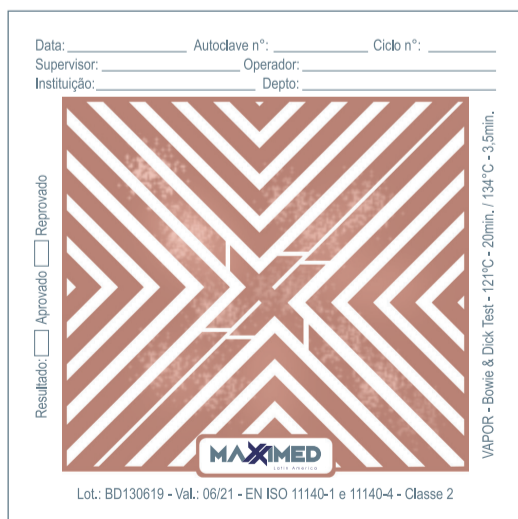

NÃO SEGURO. Vapor supersaturado.

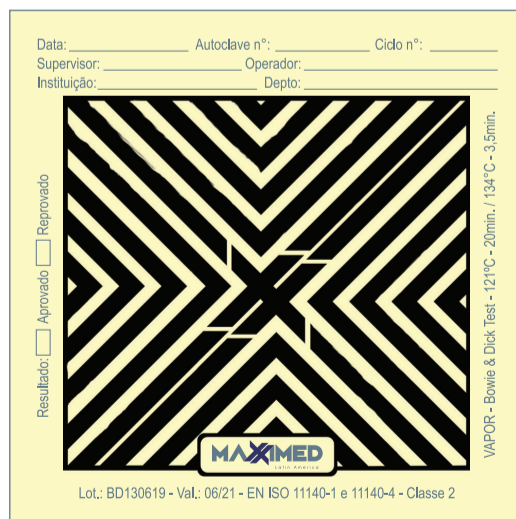

NÃO SEGURO. Vapor superaquecido e/ou exposição excessiva.

Teste Bowie & Dick 4KG (TBD4KG)
em conformidade ABNT NBR ISO 11140-5.

Teste Bowie & Dick 7KG (TBD7KG)
em conformidade ABNT NBR ISO 11140-4.

Importante: Armazenar longe de fontes de calor. As cores são representativas e podem apresentar variações.

Em caso de dúvidas, contate imediatamente o fabricante.

E-mail: sac@maxximed.com.br